

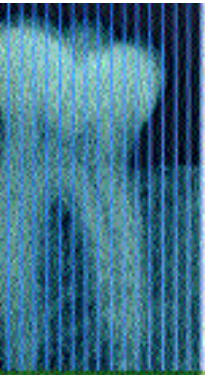


Adhesivo Adper™ Scotchbond™ Multipropósito Plus

Estándar de fuerza, confiabilidad y versatilidad.

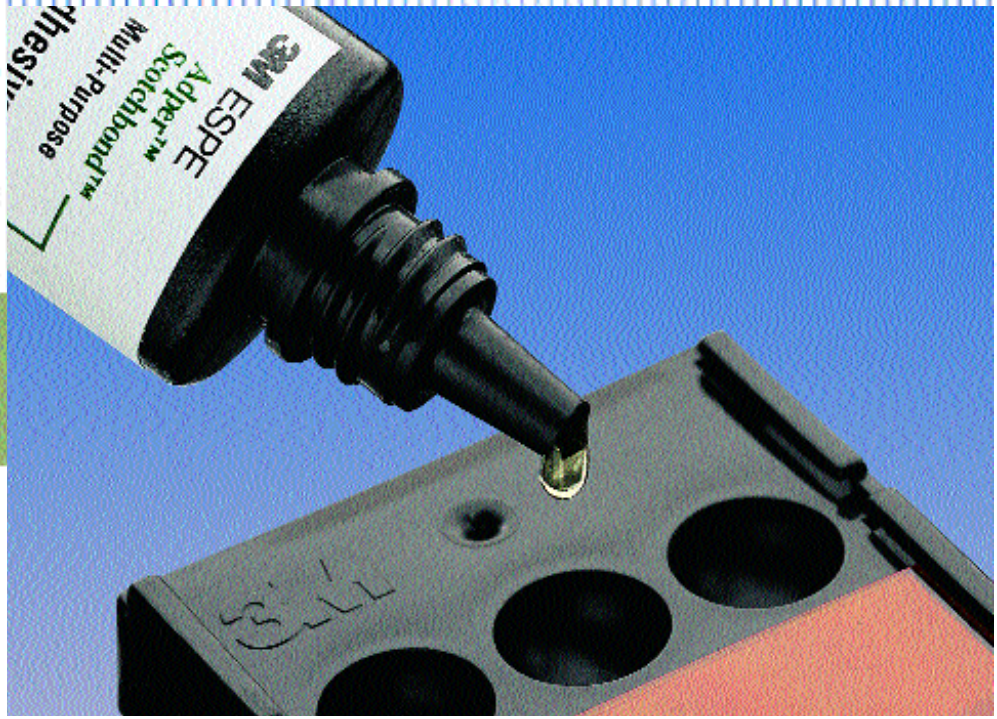

Salud con un solo producto

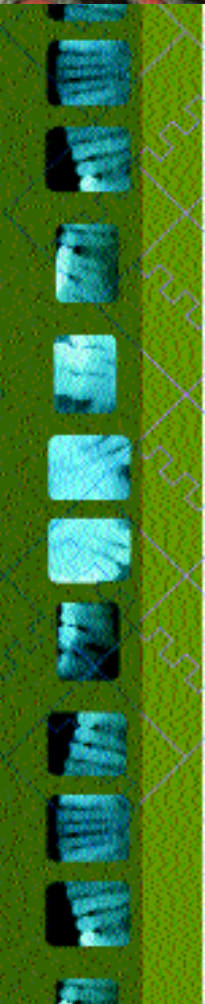

- Sistema adhesivo dental completo con capacidad de polimerización dual.
- Permite un uso confiable en cualquier aplicación.
- Se adhiere a superficies dentales húmedas o secas.
- Reduce la sensibilidad post-operatoria.
- Adhesión fuerte y confiable.
- Técnica simplificada para un uso fácil y rápido.

El Adhesivo 3M™ ESPE™ Scotchbond™ Multipropósito Plus es un sistema de adhesión que lo hace todo: lo que vuelve su trabajo más sencillo. Es rápido, fácil, ahorra tiempo y se encuentra respaldado por una larga y probada historia de éxito clínico y confiabilidad. Este sistema fuerte y versátil está considerado como el “estándar de oro” en los adhesivos dentales con los que otros adhesivos se han comparado.


El Adhesivo Adper Scotchbond Multipropósito Plus produce una adhesión fuerte y confiable que reduce la sensibilidad post-operatoria, sin tener que utilizar un agente desensibilizante. También ofrece una adhesión completa con capacidad de polimerización dual y una técnica simplificada para un uso fácil y rápido sobre una variedad de superficies como dentina, esmalte, resina, amalgama fresca, metales y porcelana. Utilícelo con confianza para la adhesión sobre superficies húmedas o secas en una variedad de aplicaciones, incluyendo restauraciones indirectas, restauraciones clase II profundas y restauraciones clase V difíciles que presenten dentina esclerótica.



Adhesivo Adper™ Scotchbond™ Multipropósito Plus

Información del producto

Fuerza adhesiva de corte a la dentina

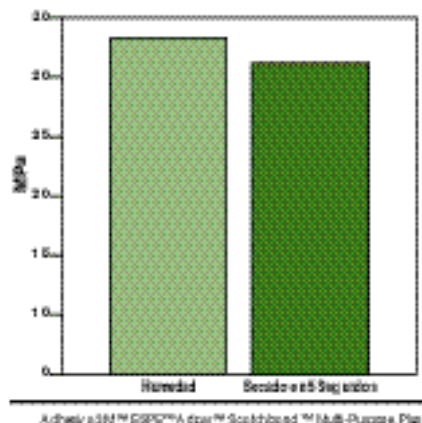

Fuerza probada

Un estudio clínico a largo plazo reportó que las restauraciones que utilizaron el Adhesivo 3M™ ESPE™ Adper™ Scotchbond™ Multipropósito Plus fueron por superiores al 90% Alfa a los 7.5 años en retención, integridad marginal y decoloración^{1,2}, probando su historia clínica a largo plazo, de fuerza y confiabilidad.

Por separado, en un estudio *in vitro* se comparó la fuerza de adhesión del Adhesivo Adper Scotchbond Multipropósito pasando de una técnica en húmedo a una técnica que incluye secado con aire durante cinco segundos. El adhesivo produjo altas fuerzas adhesivas equivalentes con ambas técnicas, lo que probó su versatilidad en una variedad de condiciones con una técnica de menor sensibilidad. Esto promueve la formación de una capa híbrida de mayor consistencia, dando como resultado una menor sensibilidad post-operatoria.

¹ Estudios Clínicos y de Laboratorio del Sistema Adhesivo Dental 3M™ Scotchbond™ Multipropósito, E. Steven Duke, DDS, Universidad de Indiana, Escuela de Odontología, James B. Summitt, DDS, MA., y Linc Conn, DDS, Universidad de Texas, Centro de Ciencias de la Salud, Richard S. Schwartz, DDS, práctica privada San Antonio, TX.

² Cuando este estudio clínico inició, 10% de ácido maléico fue empacado y utilizado como grabador con el sistema adhesivo dental Scotchbond Multipropósito. El grabador actual del sistema, 35% de ácido fosfórico proveerá resultados similares. En adición, se hizo una ligera modificación en el componente adhesivo para permitirle hacer polimerización dual como parte del Sistema Adhesivo Dental 3M™ Scotchbond™ Multipropósito Plus introducido en 1994. El componente primer dentro del sistema continúa sin ningún cambio.

Qué dicen los expertos

“El adhesivo Adper Scotchbond Multipropósito es extremadamente fácil de utilizar y provee la confianza de un largo seguimiento in-vivo que ilustra una adhesión duradera para todo tipo de superficies dentales. Adicionalmente, el primer basado en agua reduce la dependencia de controlar la cantidad exacta de la humedad de superficie. Esto resulta en una técnica menos sensitiva que los productos basados en acetona.”

E. Stephen Duke, DDS, MSD, Profesor y Director, Departamento de Odontología Restauradora, Universidad de Indiana, Escuela de Odontología.

Información para ordenar



Adhesivo 3M™ ESPE™ Adper™ Scotchbond™ Multipropósito Plus

No. de artículo Información del producto

7545S	Sistema Adhesivo Adper Scotchbond Multipropósito plus El estuche introductorio contiene: 2 Jeringas de 3ml de Grabador de Ácido Fosfórico 3M™ ESPE™ Scotchbond™ (7523), 8ml de Primer (7542), 8ml de Adhesivo (7543), 4ml de Activador (7546), 4ml de Catalizador (7547), 5ml de 3M™ ESPE™ RelyX™ Ceramic Primer (2721), 1 Godete de Mezcla Triple, Pinceles Codificados por Colores (1919).
7546	Adper Scotchbond Multipropósito Plus, activador de 4ml
7547	Adper Scotchbond Multipropósito Plus, catalizador de 4ml
3006L	Sistema Adhesivo Adper Scotchbond Multipropósito El estuche introductorio contiene: 2 Jeringas de 3ml de Grabador de Ácido Fosfórico 3M™ ESPE™ Scotchbond™ (7523), 8ml de Primer (7542), 8ml de Adhesivo (7543), 1 Godete de Mezcla Triple, Pinceles Codificados por Colores (1919).
3008	Adper Scotchbond Multipropósito, Primer de 8ml
3009	Adper Scotchbond Multipropósito, Adhesivo de 8ml

Los Adhesivos Dentales Adper son una línea completa de productos de 3M ESPE, diseñados para cumplir con todas sus necesidades de adhesión. Visite nuestra página Web o llame a su representante local 3M ESPE para mayor información sobre éste y otros productos.

3M ESPE

Dental Products

3M Center
Building 275-2SE-03
St. Paul, MN 55144-1000
USA

Papel reciclado

Impreso en EE.UU.
© 3M ESPE 2003

www.3MESPE.com/LAdental

3M, ESPE, Adper, Prompt, L-Pop, Scotchbond y RelyX son marcas registradas de 3M y 3M ESPE AG.
70-2009-3536-2