

- Retire la restauración provisional y elimine totalmente cualquier residuo de cemento usando una pasta de piedra pómez libre de aceite. Enjuague la preparación o la cavidad con un chorro de agua-aire y seque con aire, algodón o una punta de papel. Deje húmeda la superficie del diente. No deseque.
- Pruebe la restauración final y verifique su ajuste. Ajuste la restauración según sea necesario.
- Limpie completamente la superficie de adhesión de la restauración.
- Durante el proceso de cementación, mantenga el área aislada para evitar la contaminación con sangre o saliva.

Instrucciones

- Aplicación
 - Quite la tapa del dispensador Clicker presionando la palanca de la tapa hacia abajo y deslizándola hacia afuera.
 - Cuando utilice por primera vez un cartucho nuevo, dispense una pequeña cantidad de material para asegurarse que la dosis dispensada sea uniforme. Deseche el material de prueba.
 - Presione completamente la palanca del Clicker para dispensar “1 Clic” de cemento sobre el bloque de mezcla. Deje que la pasta termine de salir completamente antes de soltar la palanca del Clicker. Para obtener material adicional, repita el proceso de dispensado. La pasta se dispensa automáticamente en cantidades iguales. (La proporción del peso real dispensado es de 1.3:1)
 - Nota:** Dispense y mezcle el cemento inmediatamente antes de su uso para evitar la evaporación de agua y el consiguiente secado de la pasta de cemento.
 - Limpie las puntas del dispensador con una gasa para evitar la contaminación cruzada entre las pastas.
 - Vuelva a poner la tapa deslizándola en el dispensador hasta que se enganche firmemente, asegurándose de escuchar con claridad un “clic”.
 - Para mezclar el cemento, utilice una espátula para cementos metálica o plástica durante 20 segundos hasta lograr un color uniforme. Evite la formación de burbujas de aire.
 - Una vez mezclado, el tiempo de trabajo del cemento es de 2.5 minutos a 23°C/73°F. A temperaturas más elevadas, los tiempos de mezcla pueden reducir el tiempo de trabajo. A temperaturas más bajas, los tiempos de mezcla pueden aumentar el tiempo de trabajo.
 - Aplique una capa delgada de cemento a la superficie interna de la restauración. En el caso de restauraciones tipo inlay/onlay, el cemento también puede aplicarse directamente sobre la superficie del diente.
 - Asiente la restauración ejerciendo una ligera presión. Presione ligeramente la restauración durante todo el proceso de fraguado del cemento para asegurar su correcta posición.

2. Limpieza y terminado

- Retire el exceso de cemento una vez que haya adquirido una consistencia similar a la cera (después de 2 minutos de su colocación en la boca). Utilice un instrumento apropiado para la eliminación de excesos (por ejemplo una cureta, explorador).
- Una vez que el cemento haya fraguado completamente, después de transcurridos 5 minutos de su colocación, proceda con el terminado de la restauración y verifique la oclusión.

Almacenamiento y Uso

Este producto está diseñado para usarlo a temperatura ambiente. Si se almacena en un refrigerador, deje que el producto alcance la temperatura ambiente antes de usar. El tiempo de vida de almacenamiento a temperatura ambiente es de 24 meses. La temperatura ambiente rutinariamente superior a 27°C puede reducir la vida de almacenamiento. Vea en el exterior del paquete la fecha de caducidad.

Evite que las pastas se sequen. Antes de su almacenamiento, verifique que la tapa esté perfectamente ajustada al dispensador.

Desinfecte el producto mediante un proceso de desinfección de nivel intermedio (contacto líquido) según las recomendaciones del CDC y avalado por la ADA. Lineamientos para el control de infecciones en entornos médicos odontológicos 2003 (Vol. 52; No. RR-17), Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Eliminación - Vea la ficha de datos sobre seguridad de materiales (disponible en www.3MESPE o a través de su subsidiaria local) para información sobre eliminación.

Información para el cliente

Ninguna persona está autorizada a proporcionar información alguna que difiera de la proporcionada en esta hoja de instrucciones.

Precaución: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta o uso de este aparato bajo prescripción de profesionales odontológicos.

Garantía

3M ESPE garantiza que este producto carecerá de defectos en el material y la fabricación. 3M ESPE NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O DE COMERCIALIZABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para la aplicación que desee. Si este producto presentara defectos dentro del período de garantía indicado arriba, el único remedio y la única obligación de 3M ESPE, será el reemplazo o reparación del producto 3M ESPE.

Limitación de responsabilidades

Excepto en los casos en los que la ley lo prohíba, 3M ESPE no será responsable de ninguna pérdida o ningún daño que surja por causa del producto, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o emergentes, sin importar la teoría que se sostenga, incluso garantía, contrato, negligencia o estricta responsabilidad.

3M ESPE

Dental Products

St. Paul, MN 55144-1000

3M, ESPE, Clicker, RelyX, Vitrebond, and Lava are registered trademarks of 3M ESPE or 3M ESPE AG.

Procera® is a registered trademark of Nobel Biocare AB.

© 3M 2009. All rights reserved.

44-0007-4726-9-B