

Ayudándole a Usario Correctamente

Cómo usar su respirador de pieza facial filtrante

1



Coloque el respirador cubriendo su boca y nariz. Asegúrese que el clip metálico quede arriba. Con los modelos 8210 ó 07048, pre-estire las bandas antes de colocar el respirador.

2



Lleve la banda superior sobre su cabeza hasta apoyarla en la corona de la cabeza sobre sus orejas.

3



Lleve la banda inferior sobre su cabeza hasta apoyarla por debajo de sus orejas.

4



Utilizando los dedos índice y medio de ambas manos, empezando por la parte superior, moldee el clip metálico alrededor de la nariz para lograr un ajuste seguro.



Respirador Pieza Facial Filtrante Con Bandas No Ajustables y Con Válvula

Respirador Pieza Facial Filtrante Con Bandas No Ajustables y Sin Válvula.

Pruebe El Ajuste De Su Respirador De Pieza Facial Filtrante Cada Vez Que Se Lo Coloque.



Prueba de Ajuste de Presión Positiva

Para Respiradores Sin Válvula

Coloque ambas manos sobre el respirador, cubriéndolo totalmente, y *exhale*. El respirador deberá inflarse levemente.

Si sale aire por los bordes del respirador, reposiciónelo y reajuste el clip metálico hasta lograr un ajuste seguro. Si no lograra un ajuste correcto **no ingrese** en el área contaminada. Vea a su supervisor.



Prueba de Ajuste de Presión Negativa

Para Respiradores Con Válvula

Coloque ambas manos sobre el respirador e *inhale* con fuerza. El respirador deberá hundirse levemente. Si entra aire por los

bordes del respirador, colóqueselo nuevamente y reajuste el clip metálico hasta lograr un ajuste seguro. Si no lograra un ajuste correcto **no ingrese** en el área contaminada. Vea a su supervisor.



⚠ ADVERTENCIA

- ▲ Respirar ciertos polvos, neblinas, humos, gases o vapores puede causar enfermedad o muerte.
- ▲ Este respirador puede ayudar a protegerlo cuando lo utiliza durante todo el tiempo de exposición.
- ▲ Si no consigue un ajuste apropiado no entre al área contaminada. Vea a su supervisor.
- ▲ Vea a su supervisor por respuestas acerca de cuál respirador usar y del uso apropiado del mismo o llame a 3M en los E.E.U.U.: 1-800 243-4630. (En Canadá llame 3M: 1-800-265-1840.) En otros países, llame a la oficina local de 3M.
- ▲ Los estándares OSHA 1910.134 y CSA Z94.4-93 requieren que el usuario sea sometido a una prueba de ajuste.
- ▲ No use barba u otro pelo facial que impidan un buen sellado entre su rostro y el sello facial de respirador.