

Facetas provisionales

Las facetas de porcelana son un tratamiento cada vez más popular y aceptado para una gran variedad de defectos estéticos. Al principio se pensó que esta técnica era reversible, necesitando retirar poco o nada estructura dental, ahora se acepta generalmente que una cantidad mínima de preparación del diente es necesaria para permitir un grosor suficiente de porcelana que cree el grado deseado del color y opacidad de la cerámica y prevenir la visión a su través del material de cementado. Sin embargo, ésto deja al paciente con un diente nada estético y sensible. Se necesita una solución temporal y no hay alternativas preformadas disponibles. En esta página mostramos una técnica bien probada para producir una faceta provisional.

PROF. TREVOR BURKE

University of Glasgow
Glasgow Dental Hospital & School NHS
Trust
Primary dental Care
378 Sauchichall Street
Glasgow, G2 3JZ
UK

Materiales:

3M™ Líquido Grabador
Sistema Adhesivo Dental 3M™
Scotchbond™ Multiadhesión
Restaurador 3M™ Z100
Discos de Acabado y Pulido 3M™ Sof-Lex™



1 Después de la preparación y toma de la impresión se coloca una gota de grabador en una pequeña área en el centro de la preparación de la faceta. Después de 15-20 segundos se lava y se seca con aire.



2 La superficie entera de la preparación para la faceta se recubre ahora con resina adhesiva para una buena adaptación. Esta resina se fotopolimeriza durante 15 segundos.



3 Usando una matriz transparente se coloca sobre el diente resina compuesta del color apropiado y se adapta con instrumentos plásticos. Después de fotopolimerizar el composite puede ser acabado y pulido con Discos de Acabado y Pulido Sof-Lex.



4 Cuando la faceta permanente se va a probar la restauración provisional se quita colocando un instrumento plano incisalmente entre la restauración y el diente se apalanca suavemente. Tras la limpieza de la superficie la restauración final puede ser colocada.