


# Ketac™ Cem $\mu$

El Cemento de Ionómero de Vidrio  
*definitivo de mezcla manual*

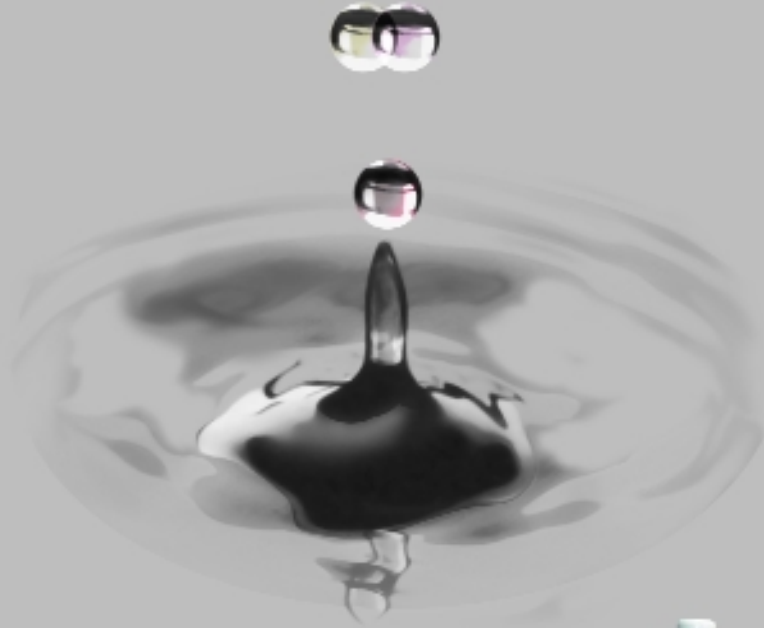

La mezcla  
más fácil y limpia

*3M™ ESPE™ Ketac™ Cem  $\mu$  es la más reciente adición tecnológica a la fila de productos 3M ESPE en cementos de ionómero de vidrio. Basado en el experimentado y probado material de cementación definitiva Ketac Cem Radiopaco, las propiedades del procesamiento en particular han sido optimizadas en este producto nuevo.*



## **Ventajas del producto:**

- Polvo con propiedades mejoradas de fluidez, que produce una dosificación mejor y reproducible, obteniendo resultados clínicos consistentes.
- Líquido para humectar el polvo que ofrece un proceso de mezcla más fácil y rápido, reduciendo la probabilidad de desperdicio del producto.
- Menor generación de polvo durante la apretura y dosificación del producto.

## **Usos:**

- Cementación de inlays, onlays, coronas y puentes hechos de metal o metal-cerámica o con recubrimiento tipo Veneer de resina.
- Cementación de inlays, onlays, coronas y puentes hechos de resina o cerámica con la condición de que éstos sean adecuados para una cementación convencional.
- Cementación de pines y tornillos siempre que éstos sean adecuados para una cementación convencional.
- Cemento definitivo para uso de bandas ortodónticas.

# Ketac™ Cem $\mu$

## No. de Catálogo

## Descripción

## Contenido

56900

Ketac Cem  $\mu$  Empaque Introductorio.

- Polvo de 30 g.
- Líquido de 12 ml.
- Un gotero.
- Un block de mezcla.
- Una cucharilla.

56902

Ketac Cem  $\mu$  Repuesto en polvo.

- Polvo de 30 g.
- Una cucharilla.

56904

Ketac Cem  $\mu$  Repuesto líquido.

- Líquido de 12 g.
- Gotero.

56906

Ketac Cem  $\mu$  Triple Pack.

- 3 botellas de polvo de 30 g.
- 3 botellas de líquido de 12 ml.
- 3 goteros.
- Un block de mezcla.
- Una cucharilla.

## Tiempos

- Tiempo para mezclar el material **0:30 seg**
- Tiempo de trabajo incluyendo mezcla **3:10 min**
- Tiempo de polimerización desde el inicio de la mezcla **7:00 min**



*absorción de agua de Ketac™ Cem Radiopaco*



*absorción de agua del nuevo Ketac™ Cem  $\mu$*

*Para mayores informes sobre este u otros productos, favor de contactar a su representante 3M ESPE en su país o visitar nuestra página:*

[www.3mespe.com/ladental](http://www.3mespe.com/ladental)

Referencias:

Perfil Técnico del Producto Ketac Cem

**3M ESPE**

Dental Products  
3M CenterBuilding  
275-2SE-03  
St. Paul, MN 55144-1000



Papel reciclado.

3M, ESPE y Ketac Cem  $\mu$  son marcas registradas de 3M y 3M ESPE AG.

© 3M 2002.

70-2009-2403-6