

Tratamiento de las Raíces Sensibles

En un número anterior de Fenestra describimos el uso del 3M Scotchbond 1 Sistema de Adhesión Dental para tratar superficies radiculares sensibles de forma rápida y efectiva. Hicimos notar que se estaban llevando a cabo estudios para medir el efecto del tratamiento sin grabado ácido para eliminar la necesidad de la anestesia local. Los resultados de éstos estudios se dieron a conocer en el IADR en Niza en Junio de 1998; el 3M Scotchbond 1 Sistema Adhesivo Dental es efectivo en tratamiento de la superficie radicular sensible con o sin grabado ácido de las superficies dentales. En ésta página se describe la técnica para el método sin grabado ácido.

DR. MARCO FERRARI

Piazza Attias 19
57125 Livorno
Italia

Materiales:

3M™ Scotchbond™ 1 Adhesivo Dental



1 La superficie que va a ser tratada fue primero limpiada con polvo de pómez para eliminar restos.



2 Dos capas consecutivas de 3M Scotchbond 1 Adhesivo Dental fueron aplicadas a la superficie dentinal (no se llevó a cabo el paso del grabado).



3 El material se secó con aire suavemente, dejando una superficie de apariencia brillante.



4 Un corto polimerizado de 10 segundos se utilizó para polimerizar ésta primera aplicación.



5 Una segunda capa de 3M Scotchbond 1 Adhesivo Dental, de nuevo consistente en dos capas consecutivamente aplicadas de adhesivo.



6 La segunda capa es también secada suavemente con aire dejando nuevamente la superficie brillante.



7 Una exposición a la luz de 10 segundos se utilizó para polimerizar la segunda capa.



8 La capa inhibida por aire es eliminada, las capas de 3M Scotchbond 1 Adhesivo Dental eliminaron la sensibilidad.