

Carilla Directa de Composite

El dentista tiene muchas opciones disponibles para realizar correcciones en los dientes con alteración del color. Blanqueamiento, carillas de porcelana y coronas completas todas ellas con diferentes ventajas y desventajas. Cuando los pacientes quieren el tratamiento más directo y con buena relación coste / eficacia, la carilla directa de composite ofrece una buena solución. Se trata de una alternativa económica y satisfactoria frente a otros métodos, y disponible fácilmente para todo dentista general.

DR. GABRIEL TULUS

Gesslerstr. 14
44141 Dortmund.
Alemania

Materiales:

3M™ Scotchbond™ Multiadhesión Plus
Sistema adhesivo Dental
3M™ Silux Plus™ Material Restaurador
Fotopolimerizable



1 Este paciente vino a la clínica con un incisivo central decolorado después del tratamiento endodóntico. Ella quería solamente tratamiento directo, y el ángulo mesial del otro incisal no debía ser restaurado



2 Se eliminó la restauración de composite a causa del filtrado marginal, y se realizó una preparación para carilla supragingival. Después de la preparación el diente se limpió y secó.



3 Después del grabado ácido y secado, se aplicó primero el primer y luego adhesivo del 3M Scotchbond Multiadhesión. El adhesivo se secó suavemente con aire y luego se fotopolimerizó.



4 Se colocó composite 3M Silux Plus con la ayuda de una tira matriz transparente. Después del fotopolimerizado la carilla se acabó con una fresa y discos de pulido 3M Sof-Lex. En los controles de rutina la carilla mostró estar funcionando muy bien hasta ahora (18 meses).