

Restauraciones anteriores directas

Los composites universales han llegado a ser muy populares para una amplia variedad de tratamientos restauradores directos. Sin embargo, en circunstancias extremas puede ser muy útil el más amplio campo de posibilidades de los restauradores específicamente anteriores. En este caso clínico el paciente rehusó el tratamiento indirecto. Se escogió un restaurador de microrelleno para enmascarar las alteraciones de color y poder restablecer una estética aceptable.

DR. ANNA SALOVA

Departamento de Odontología Terapéutica
Educación Postgraduada en la Academia Medica
St-Petersburg, Rusia

Materiales:

3M™ Z100™ MP Restaurador
3M™ Scotchbond™ 1 Sistema Dental Adhesivo
3M™ Silux Plus™ Restaurador de Anteriores
3M™ Agentes de Enmascaramiento



1 Se presentó un paciente masculino de 42 años con serias erosiones y problemas estéticos. Quería tener un mejoramiento de su estética pero rehusó el tratamiento ortodóntico y el indirecto.



2 Tras una pequeña preparación del canino superior derecho fue restaurado con una faceta directa de composite. El incisivo superior lateral derecho fue reconstruido con composite. Los incisivos superiores centrales se prepararon a fin de permitir suficiente espacio para varias capas de composite.



3 Para simplificar el trabajo restaurador se utilizó adhesivo dental 3M Scotchbond 1. Tras el grabado ácido y el secado de las superficies dentales, se colocaron dos capas de adhesivo, secándose ligeramente con aire y fotopolimerizándose durante 10 segundos.



4 Con la ayuda de un pincel se colocó 3M Agente de Enmascaramiento de color universal (B3) a los incisivos centrales. Las superficies palatinas de estos dientes se restauraron entonces con el restaurador 3M Z100 MP.



5 En las superficies labiales las restauraciones se complementaron con incrementos del Restaurador para Anteriores 3M Silux Plus; color cervical natural en el área gingival, cuerpo natural y claro para el centro del diente e incisal para los bordes incisales.



6 Después del tratamiento endodóntico el canino superior izquierdo se preparó ampliamente y se restauró con un poste y composite. El incisivo lateral también fue reconstruido con composite a fin de alinearlo también dentro del arco dental.



7 8 Las restauraciones terminadas.

