

Acceso a canal radicular después de la restauración

El tiempo después del trauma dental y antes del tratamiento final de los dientes puede ser difícil. Los pacientes normalmente quieren la devolución de su estética inmediatamente o al menos lo antes posible. A veces sin embargo se necesita más tiempo para tratarlo adecuadamente y estabilizar el diente. Posteriormente se puede tomar la decisión adecuada del tipo de restauración final basándose en la estabilidad del diente y su pronóstico. Las técnicas directas con composite pueden ayudar a mejorar este tiempo de forma estéticamente aceptable y manteniendo a la vez acceso al tratamiento.

DR. DOMINICO COLUCCI

Via Riviera di Chiaia 276
Nápoles, Italia

Materiales:

3M™ Scotchbond™ Multiadhesión Sistema Adhesivo Dental
Restaurador 3M™ Z100™ MP
3M™ Silux Plus™ Material Restaurador para anteriores
3M™ Sof-Lex™ Sistema de Acabado y Pulido



1 Este paciente varón joven con serios problemas en su aspecto físico vino a la clínica tras hospitalización por accidente traumático. Antes de la decisión de los procedimientos de restauración final, se eligieron técnicas de composite directas para comenzar la restauración morfológica del incisivo.



2 Puesto que fue necesaria medicación provisional, se decidió dejar abierto el canal radicular y la cámara pulpar. Considerando la situación de los tejidos blandos, el problema del aislamiento se solucionó con matrices lisas y cuñas de madera.



3 Después del grabado ácido, se aplicó 3M Scotchbond Multiadhesión a esmalte y dentina. La cara palatina del diente fue entonces restaurada con restaurador 3M Z100 MP.



4 El material restaurador 3M Silux Plus fue colocado incrementalmente sobre la superficie labial. Después del acabado y pulido con discos 3M Sof-Lex, el resultado estético fue muy agradable.