

Tratamiento de la sensibilidad radicular

Cuando las superficies de las raíces se vuelven muy sensibles los pacientes normalmente buscan tratamiento. Con el sistema adhesivo dental 3M Scotchbond 1 las raíces sensibles se tratan rápida y eficazmente, ofreciendo un alivio para el dolor de largo plazo. La técnica de aplicación según las instrucciones como se muestra en esta página, requiere grabado ácido. Por esta razón generalmente es necesario administrar anestesia local. Se están llevando a cabo estudios para medir el efecto sin el grabado ácido, a fin de eliminar la necesidad de anestesia local. Quedamos en la esperanza de que usted pueda leer sobre esta nueva técnica en un futuro número de la revista *Fenestra*.

DR. MARCO FERRARI

Piazza Attias 19
57125 Livorno
Italia

Materiales:

3M™ Scotchbond™ 1 Adhesivo Dental



1 Se aplicó anestesia local antes del tratamiento de este diente a causa de dentina radicular altamente sensible.



2 La superficie a tratar fue pulida con una mezcla de pómez y harina para quitar todo resto superficial.



3 El grabado ácido de la superficie durante 15 segundos fue seguido por lavado con agua y un suave secado con aire.



4 La dentina grabada debe permanecer ligeramente húmeda (brillante).



5 Se aplicaron dos capas de 3M Scotchbond 1 y se secaron suavemente.



6 Un corto polimerizado de 10 segundos fue seguido de una segunda aplicación de dos capas de adhesivo, que también fueron secadas y fotopolimerizadas durante 10 segundos.



7 La capa inhibida por aire fue entonces eliminada.



8 Se utilizó una sonda para comprobar la adaptación y el exceso.



9 Vista del caso terminado. La sensibilidad se eliminó totalmente.